



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHODAI[®]



BR



Banda Rotuliana Orthodai

Fabricada en neopreno perforado para mayor frescura, cinturón de ajuste y cierres de contacto.

Color: Negro
Tallas: Unitalla

Instrucciones de Uso:

Coloque la banda debajo de la rotula haciendo presión en el tendón, como se muestra en la imagen para disminuir el dolor.



Importante:

Cuide no ajustar la banda con una fuerza excesiva para evitar problemas de circulación. En caso de que la rotula se encuentre fuera de su sitio, se recomienda utilizar una rodillera de anillo centrador.

Este producto es solo un auxiliar y no por si mismo regenerador de cualquier tipo de fractura o esguince.

Uso Común:

Auxiliar en casos de tendinitis o tendinopatía rotuliana.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Medidas de Empaque:

Alto: 30.5 cms.
Ancho: 10 cms.
Profundidad: 3 cms.

Peso de Producto empacado:
60 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 7506372604257

Composición:
Cierre de contactel
Contenido de la fibra:
Nylon stretch
Espuma de neopreno
de células cerradas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**