



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**Thermo**  
Seeds



**COM/CER**



## Compresa Térmica de Semilla Cervical Thermo Seeds

Compresa rellena de una combinación de diversas semillas térmicas y aromatizantes.

Color: Verde

Tallas: Unitalla

### Instrucciones de Uso:

Para calentar la compresa introduzca en el micro ondas sobre un recipiente por al menos 1:30 min. y posteriormente verifique la temperatura, en caso de ser necesario vuelva a calentar por otros 30 seg. Antes de ser colocada en la piel, envuelva con un paño limpio y seco, esto para evitar quemaduras en la zona de aplicación, dicho paño puede ser retirado según la temperatura de la compresa. La aplicación puede ser de 15 a 20 min.

### Importante:

El tiempo en el micro ondas no debe sobrepasar inicialmente los 2 minutos, ya que la compresa podría quemarse. Mantenga la compresa en un lugar seco y fresco.

### Uso Común:

Utilizado como analgésico y para relajación muscular, ayuda a desinflamar y descontracturar alguna zona corporal.

### Contraindicaciones:

No utilizar en caso de dermatitis diversa, heridas expuestas, infecciones, zonas de hipoestesia y anestesia o en zonas sensibles al calor.

Este producto podría ser flamable.

No exponer al fuego.

### Medidas de Empaque:

Alto: 24 cms.

Ancho: 18 cms.

Profundidad: 4 cms.

### Peso de Producto empacado:

490 gms.

Clave SAT: 42142108

Clave de Unidad: H87

**EAN-13: 7506372604479**

Composición:  
Tela de algodón/poliéster  
Cinta de poliéster  
Relleno de semillas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

**HECHO EN MEXICO**



Fabricado por:

ortopedia  
de  
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595

