



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI



CGT-01

Compresa de Gel Térmico Antifaz Orthodai

Compresa de gel térmico con diseño de antifaz con capacidad de utilizarse en frío y caliente.

Color: Azul

Tallas: Unitalla



Medidas de Empaque:

Alto: 29 cms.

Ancho: 14 cms.

Profundidad: 1 cm.

Peso de Producto empacado:

220 gms.

Clave SAT: 42142108

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 7506372606268

Composición:
Compresa de gel
Cinturón con cierre
de contactel

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Instrucciones de Uso:

Frío:

Coloque la compresa durante 10 minutos en el congelador y al utilizarla, asegure el cinturón con el cierre de contacto al rededor de la cabeza.

Caliente:

Sumergir en agua caliente al rededor de 10 minutos y después colocar asegurando el cinturón con el cierre de contacto al rededor de la cabeza.

Importante:

Cuide que la temperatura sea adecuada para estar en contacto con la piel antes de colocarla.

Uso Común:

Frío:

Reducción de molestias por alergias, dolor de cabeza, fiebre e hinchazón de hematomas, así como el volumen de bolsas en el contorno de los ojos.

Caliente:

Promueve la relajación antes de dormir, disminuye la presión por el esfuerzo visual y minimiza los rasgos de envejecimiento.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Algunos de los componentes de este producto podrían ser flamables.

No exponer al fuego.

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**