



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



CGT

Compresa de Gel Térmico Orthodai

Compresa de gel térmico para dolores o molestias musculares con capacidad de utilizarse en caliente y frío
Color: Azul

Tallas: Mediana: 18 cms. x 12 cms.

Grande: 25 cms. x 12 cms.

Instrucciones de Uso:

Frío:

Guarde en el refrigerador y retirar después de un tiempo, envolver con una toalla delgada y aplique en el área que presente molestias.

Caliente:

Ponga a hervir 3 litros de agua y sumerja la compresa por aproximadamente 10 minutos, saque y envuelva con una toalla delgada y aplique en el área que presente molestias.

Importante:

Este producto es reusable y no es tóxico, sin embargo se debe desechar en caso de que esté perforado.

Uso Común:

Frío:

Alivia inflamaciones, dolores de cabeza, fiebre, raspones, quemaduras leves, entre otros.

Caliente:

Reduce y alivia dolores musculares, artríticos, de espalda, menstruales, tensiones musculares y activa la circulación.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable.

No exponer al fuego.

Composición:
Gel térmico
Bolsa plástica

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

Mediana:

Alto: 23 cms.

Ancho: 14 cms.

Profundidad: 1 cm.

Grande:

Alto: 29 cms.

Ancho: 14 cms.

Profundidad: 1 cm.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Med: 230 gms.

Gde: 290 gms.

Clave SAT: 42142108

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Med.: 7506372606275

Gde.: 7506372606282



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**