



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHODAI®



RCN



Rodillera Corta de Neopreno Orthodai

Fabricada en neopreno perforado para mayor frescura, cojinete de soporte y cierres de contacto.

Color: Negro
Tallas: Unitalla

Instrucciones de Uso:

Coloque la parte del cojinete sobre la rodilla procurando que la rotula quede en el orificio frontal y posteriormente ajuste con los cierres de contacto dando vuelta al rededor de la misma rodilla.

Importante:

Este producto es solo un auxiliar y no por si mismo regenerador de ningún tipo de fractura o esguince. Evite ajustar de forma excesiva los cierres de contacto ya que podría generar molestias o irritación.

Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento de ligeras contusiones, artrosis, artritis, tratamiento post-operatorio o cualquier patología que requiera centrar la rotula y disminuir la carga de la misma.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Medidas de Empaque:

Alto: 31 cms.
Ancho: 9.5 cms.
Profundidad: 5.5 cms.

Peso de Producto empacado:

130 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 7506372604240

Composición:
Contactel
Contenido de la fibra:
Nylon stretch
Espuma de neopreno
de células cerradas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**