



COM



Compresa de Semilla Lumbar/Abdominal Thermo Seeds

Compresa rellena de una combinación diversa de semillas térmicas y aromatizantes.

Color: Verde

Tallas: Chica: 19 cm. x 22 cm.

Grande: 20 cm. x 45 cm.

Medidas de Empaque:

Chica:

Alto: 24 cms.

Ancho: 18 cms.

Profundidad: 4 cms.

Grande:

Alto: 28 cms.

Ancho: 24 cms.

Profundidad: 4 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 430 gms.

Grande: 770 gms.

Clave SAT: 42142108

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chica: 7506372604486

Grande: 7506372604493

Instrucciones de Uso:

Para calentar la compresa introduzca en el micro ondas sobre un recipiente por al menos 1:30 min. y posteriormente verifique la temperatura, en caso de ser necesario vuelva a calentar por otros 30 seg. Antes de ser colocada en la piel, envuelva con un paño limpio y seco, esto para evitar quemaduras en la zona de aplicación, dicho paño puede ser retirado según la temperatura de la compresa. La aplicación puede ser de 15 a 20 min.

Importante:

El tiempo en el micro ondas no debe sobrepasar inicialmente los 2 minutos, ya que la compresa podría quemarse. Mantenga la compresa en un lugar seco y fresco.

Uso Común:

Utilizado como analgésico y para relajación muscular, ayuda a desinflamar y descontracturar alguna zona corporal.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de dermatitis diversa, heridas expuestas, infecciones, zonas de hipoestesia y anestesia o en zonas sensibles al calor.

Este producto podría ser flamable.

No exponer al fuego.



Composición:
Tela de algodón/poliéster
Cinta de poliéster
Relleno de semillas

Fabricado por:
 **ortopedia
de
excelencia**

Blvd. Carlos Camacho Espiritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

