



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



FAJASVN

Faja Sacrolumbar Ventilada Orthodai

Fabricada en elástico ventilado, cierre de contacto, corte "V", cinturón de ajuste y varillas de aluminio moldeable.

Color: Beige

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande



Medidas de Empaque:

Alto: 35 cms.

Ancho: 14 cms.

Profundidad: 7 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 320 gms.

Med: 320 gms.

Gde: 3500 gms.

Extra Gde: 370 gms.

Clave SAT: 42241802

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372602833

Med.: 7506372602840

Gde.: 7506372602857

Extra: 7506372602864

Registro Sanitario:

No. 0507C2016 SSA

Composición:
Elástico
Contactel
Varillas de Aluminio

Instrucciones de cuidado

- lavase a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Instrucciones de Uso:

Coloque la faja abierta sobre la zona sacro y lumbar, cuidando que la etiqueta quede hacia arriba. Estire con ambas manos los elásticos anchos hacia la zona abdominal uniendo las superficies de contacto. Estire los elásticos angostos de refuerzo y una las superficies de contacto sin exceder en la compresión para evitar molestias.

Importante:

Este producto forma parte de un tratamiento y su uso excesivo puede ocasionar diversos trastornos como alteraciones en la circulación, irritación y debilidad muscular en la espalda.

Uso Común:

Tratamiento de recuperación en lesiones del área sacro y lumbar.

Contradicciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO