



FALU-02



Férula Tipo Ranita de Aluminio Orthodai

Fabricada en aluminio moldeable y almohadilla en la parte interior.

Color: Aluminio

Tallas: Chica, Mediana y Grande

Paquete de 10 piezas

Instrucciones de Uso:

Coloque el dedo lesionado al centro de la férula, cuidando que se encuentre recto y posteriormente ajuste moldeando los extremos de la férula de manera que hagan presión sobre el dedo para su inmovilización.

Importante:

Asegurese de que los extremos de la férula no queden flojos, ya que no cumpliría con el propósito de inmovilizar.

Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento de esguinces, torceduras, dolor de articulación o en cualquier patología que precise la inmovilización del dedo.


Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables.

No exponer al fuego.

Composición:
Pieza de aluminio
Almohadilla interior

Instrucciones de cuidado

-  lavese a mano en agua templada con jabón neutro
-  no exprimir
-  no utilizar maquinas de lavar y o secar
-  no usar cloro
-  no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

<i>Chica:</i>	<i>Grande:</i>
Alto: 5.5 cms.	Alto: 9 cms.
Ancho: 2 cms.	Ancho: 2.5 cms.
Prof.: 2 cms.	Prof.: 2.5 cms.

<i>Mediana:</i>	<i>Paq. 10:</i>
Alto: 7 cms.	Alto: 25 cms.
Ancho: 2.5 cms.	Ancho: 35 cms.
Prof.: 2.5 cms.	Prof.: 2.5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 10 gms.
Med: 10 gms.
Gde: 20 gms.
Paq. 10: 110 gms.

Clave SAT: 42241807

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chica: 7506372606381
Med.: 7506372606398
Gde.: 7506372606404
Paq. 10: 7506372606411