



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



INMUOP



Inmovilizador de muñeca Orthopeke's

Fabricado en tela acojinada, cierres de contacto y varilla de aluminio moldeada.

Colores: Azul, Rojo, Rosa y Naranja

Tallas: 4 a 6 años, 8 a 10 años y
12 a 14 años

Composición:
Tela de poliéster
Cierre de contacto
Barra de aluminio

Instrucciones de cuidado

- lavase a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y/o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

Alto: 17 cms.

Ancho: 9 cms.

Profundidad: 2.5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

4 a 6: 90 gms.

8 a 10: 100 gms.

12 a 14: 110 gms.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

4 a 6 Azul: 7506372605407

4 a 6 Rojo: 7506372605377

4 a 6 Rosa: 7506372605384

4 a 6 Naranja: 7506372605391

8 a 10 Azul: 7506372605445

8 a 10 Rojo: 7506372605414

8 a 10 Rosa: 7506372605421

8 a 10 Naranja: 7506372605438

12 a 14 Azul: 7506372605483

12 a 14 Rojo: 7506372605452

12 a 14 Rosa: 7506372605469

12 a 14 Naranja: 7506372605476

Instrucciones de Uso:

Coloque la muñquera del lado palmar verificando que la barra de aluminio esté colocada en el mismo sentido y sujétela con los cierres de contacto, si al colocarse su muñquera observa que la barra no se encuentra del lado palmar, retirela por la parte inferior e insertela bajo la tira de contacto que corresponda.

Importante:

No ajuste los cinturones de contacto de forma excesiva ya que podría causar alguna encoriación en la piel, este producto debe ser utilizado bajo supervisión médica.

Uso Común:

Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura, inmovilización controlada de la articulación, osteoartritis degenerativas, post-operatorios de sinovitis y esguinces recidivantes de muñeca.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser inflamable.

No exponer al fuego.



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Bld. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

