



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



INPOP



Inmovilizador de Pulgar Orthopeke's

Fabricado en tela acojinada, cierres de contacto y varilla de aluminio moldeada.

Colores: Azul, Rojo, Rosa y Naranja

Tallas: 4 a 6 años, 8 a 10 años y 12 a 14 años

Composición:
Tela de poliéster
Cierre de contacto
Varilla de aluminio

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

Alto: 17 cms.

Ancho: 9 cms.

Profundidad: 2.5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

4 a 6: 50 gms.

8 a 10: 60 gms.

12 a 14: 75 gms.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

4 a 6 Azul: 7506372605285

4 a 6 Rojo: 7506372605254

4 a 6 Rosa: 7506372605261

4 a 6 Naranja: 7506372605278

8 a 10 Azul: 7506372605322

8 a 10 Rojo: 7506372605292

8 a 10 Rosa: 7506372605308

8 a 10 Naranja: 7506372605315

12 a 14 Azul: 7506372605360

12 a 14 Rojo: 7506372605339

12 a 14 Rosa: 7506372605346

12 a 14 Naranja: 7506372605353

Instrucciones de Uso:

Coloque el inmovilizador en la mano partiendo del dedo pulgar hacia la muñeca, cubra el pulgar y sujételo con el cierre de contacto, finalmente ajuste el cinturón más ancho en la muñeca.

Importante:

Evite ajustar de manera excesiva los cinturones, ya que podría generar molestia o irritación. Este producto es solo un auxiliar y no por si mismo regenerador de ningún tipo de fractura o esguince.

Uso Común:

Auxiliar en problemas de dolores articulares producidos por artrosis o rizartrosis en la base del pulgar.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable.

No exponer al fuego.

Fabricado por:



Bld. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

