



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI



INPO

Inmovilizador de Pulgar Orthodai

Fabricado en tela acojinada, varilla de aluminio moldeable y cierres de contacto elásticos.

Color: Negro

Tallas: Unitalla

Ambidiestra



Medidas de Empaque:

Alto: 28 cms.

Ancho: 8.5 cms.

Profundidad: 3.5 cms.

Peso de Producto empacado:

50 gms.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 7506372605698

Instrucciones de Uso:

Coloque el inmovilizador por el costado de la mano lesionada, ya sea izquierda o derecha procurando que la férula cubra el dedo pulgar a inmovilizar, ajuste los cierres de contacto, tanto de los cinturones elásticos, así como el del pulgar.

Importante:

Evite ajustar de manera excesiva los cierres de contacto, ya que podría provocar molestias o irritación. El uso de este producto debe ser bajo supervisión médica.

Uso Común:

Tratamiento auxiliar de procesos dolorosos de articulación, además de estabilización mínima de articulación del cúbito, radio, carpal.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable.

No expone al fuego.

Composición:
Tela acojinada
Cierres de contacto
Barra de aluminio

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espiritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**