



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**



**RET**

## Inmovilizador de Rodilla Tripanel 19" Orthodai

Fabricada en tela acojinada co paneles de ajuste y cinturones de sujeción, posee varillas de aluminio rígidas para inmovilizar.

Color: Negro

Tallas: Unitalla 19"



### Medidas de Empaque:

Alto: 55 cms.

Ancho: 19 cms.

Profundidad: 7 cms.

### Peso de Producto empacado:

580 gms.

Clave SAT: 42241703

Clave de Unidad: H87

**EAN-13: 7506372604165**

#### Composición:

Tela de poliéster  
4 barras de aluminio  
Contactel  
Herrajes de polímero  
Protectores de vinil

#### Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

**HECHO EN MEXICO**

### Instrucciones de Uso:

Coloque el inmovilizador por detrás de la pierna y ajuste cada uno de los paneles con los cierres de contacto, procurando que la rotula de la rodilla quede en el orificio que se encuentra al centro.



### Importante:

No ajuste los cierres con una fuerza excesiva para evitar irritación o algún tipo de molestia.

### Uso Común:

Auxiliar en la recuperación de músculos y tendones de la rodilla después de una lesión o proceso quirúrgico.

### Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Fabricado por:



ortopedia  
de  
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**