



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI



MEA

Muñequera Estabilizadora Orthodai

Fabricada en tela acojinada, barra de aluminio rígida moldeada y cierres de contacto.

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande

Instrucciones de Uso:

Coloque la muñequera procurando que la barra de aluminio se encuentre en el área palmar y ajuste con los cierres de contacto usando los eslabones plásticos.

Importante:

No ajuste la cintas de manera excesiva ya que podría causar molestias o irritación. Debe usar el producto bajo la supervisión de un médico.

Este producto es solo un auxiliar y no por sí mismo regenerador de ningún tipo de fractura o esguince.

Uso Común:

Auxiliar en problemas de síndrome Carpiano, artritis reumatoide, esguince y soporte post-operatorio.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable.

No exponer al fuego.

Composición:
Tela laminada
Cinta de poliéster
Cierre de contacto
Barra de aluminio palmar
Varillas plásticas de soporte

Instrucciones de cuidado		lavese a mano en agua templada con jabón neutro
		no exprimir
		no utilizar maquinas de lavar y o secar
		no usar cloro
		no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cms.

Ancho: 15 cms.

Profundidad: 4 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 130 gms.

Med: 140 gms.

Gde: 150 gms.

Extra Gde: 160 gms.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372605858

Med.: 7506372605865

Gde.: 7506372605872

Extra: 7506372605889



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**