



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI[®]



ONR05

Rodillera Mecánica Abierta Neopreno Orthodai

Fabricada de neopreno perforado para mayor frescura, doble varilla metálica articulada, cojinete de soporte y cierres de contacto.

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande



Medidas de Empaque:

Alto: 41 cms.

Ancho: 16 cms.

Profundidad: 5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 430 gms.

Med: 430 gms.

Gde: 450 gms.

Extra Gde: 450 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372606015

Med.: 7506372606022

Gde.: 7506372606039

Extra: 7506372606046

Instrucciones de Uso:

Coloque la rodilla detrás del orificio frontal de la rodillera, asegurando que el cojinete quede debajo de la rotula, cierre por la parte de atrás y asegure con los cinturones de ajuste.



Importante:


Evite ajustar los cinturones de manera excesiva, ya que podría generar molestias o irritación. El uso de este producto debe ser bajo supervisión médica. Para el lavado de la pieza se deben retirar las varillas metálicas.

Uso Común:


Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o en tratamientos post-operatorios.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

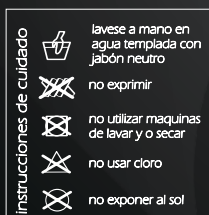

HECHO EN MEXICO

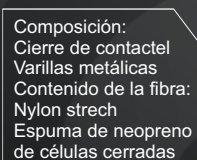

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO