



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHODAI®



ONR04



Rodillera Mecánica Cerrada Neopreno Orthodai

Fabricada en neopreno perforado para mayor frescura, doble varilla flexible, cojinete de soporte y cierres de contacto.

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande

Instrucciones de Uso:

Coloque la rodillera introduciendo el pie por el extremo más ancho y deslizando la pieza hasta que la rotula se encuentre en el orificio frontal asegurando que las varillas estén en la posición correcta a los costados de la rodilla y finalmente asegure con los cinturones de ajuste.

Importante:

Evite ajustar de manera excesiva los cinturones, ya que podría generar molestia o irritación. El uso de este producto debe ser bajo supervisión médica.

Uso Común:

Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o en tratamientos post-operatorios.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Medidas de Empaque:

Alto: 41 cms.

Ancho: 16 cms.

Profundidad: 5 cms.

Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 390 gms.

Med: 390 gms.

Gde: 410 gms.

Extra Gde: 410 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372605971

Med.: 7506372605988

Gde.: 7506372605995

Extra: 7506372606008



HECHO EN MEXICO

Composición:
Cierre de contactel
Varillas flexibles
Contenido de la fibra:
Nylon stretch
Espuma de neopreno
de células cerradas

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**