



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



RRN



Rodillera Rotuliana de Neopreno Orthodai

Fabricada en neopreno perforado para mayor frescura, cojinete para rotula y cierres de contacto.

Color: Negro
Tallas: Unitalla

Instrucciones de Uso:

Coloque el extremo ancho por la parte de la corva y posteriormente estire los tirantes hacia el frente para ajustarlos por encima y debajo de la rotula, procurando que ésta última quede libre de cualquier presión y de igual manera, que el cojinete se encuentre sobre el tendón rotuliano.

Importante:

En caso de que la rotula se encuentre fuera de su sitio se recomienda el uso de una rodillera con anillo centrador. Evite ajustar de manera excesiva los tirantes, ya que podría generar molestias o problemas circulatorios.

Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento de casos de tendinitis o tendinopatía rotuliana.

Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Medidas de Empaque:

Alto: 23.5 cms.
Ancho: 14 cms.
Profundidad: 4 cms.

Peso de Producto empacado:
90 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 7506372604264

Composición:
Contactel
Contenido de la fibra:
Nylon stretch
Espuma de neopeno
de células cerradas

Instrucciones de cuidado

- lavese a mano en agua templada con jabón neutro
- no exprimir
- no utilizar maquinas de lavar y o secar
- no usar cloro
- no exponer al sol

HECHO EN MEXICO



Fabricado por:

ortopedia
de
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**