



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

# ORTHO DAI®



## ONR07

### Rodillera Varillas Flexibles Neopreno Orthodai

*Fabricada en neopreno perforado para mayor frescura, doble varilla flexible, cojinete de soporte y cierres de contacto.*

Color: Negro

Tallas: Chica, Mediana, Grande y Extra Grande



#### Medidas de Empaque:

Alto: 41 cms.

Ancho: 16 cms.

Profundidad: 5 cms.

#### Peso de Producto empacado:

Talla:

Chica: 170 gms.

Med: 170 gms.

Gde: 180 gms.

Extra Gde: 180 gms.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

#### EAN-13:

Chico: 7506372606091

Med.: 7506372606107

Gde.: 7506372606114

Extra: 7506372606121

#### Instrucciones de Uso:

Coloque la rodillera introduciendo el pie por el extremo más ancho y deslizando la pieza hasta que la rotula se encuentre en el orificio frontal asegurando que las varillas estén en la posición correcta a los costados de la rodilla y finalmente asegure con los cinturones de ajuste.

#### Importante:

Evite ajustar de manera excesiva los cinturones, ya que podría generar molestias o irritación. El uso de este producto debe ser bajo supervisión médica.

#### Uso Común:

Auxiliar en problemas de artrosis, artritis, dolor articular, tendinitis, ligeras inestabilidades de rotula y medio laterales.

#### Contraindicaciones:

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser flamable. No exponer al fuego.

Instrucciones de cuidado



lavese a mano en agua templada con jabón neutro



no exprimir



no utilizar maquinas de lavar y o secar



no usar cloro



no exponer al sol

#### Composición:

Cierre de contactel

Varillas flexibles

Contenido de la fibra:

Nylon stretch

Espuma de neopreno

de células cerradas.

HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia  
de  
excelencia

Blvd. Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595

CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO