



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## INMCRA Inmovilizador de Cráneo

Color: Negro.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

Este auxiliar se utiliza para sujetar el cráneo de pacientes que son sujetos o inmovilizados en una camilla de rescate.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque la base del inmovilizador sobre una superficie plana.
2. Desabroche los cinturones de barbilla y frente para liberar los dos cojinetes.
3. Sujete los cojinetes sobre la superficie plana con el contactel manteniéndolos erguidos.
4. Ubique cuidadosamente la cabeza del paciente entre ambos cojinetes y rectifique que el movimiento sea limitado.
5. Abroche los cinturones de frente y barbilla ajustándolos con ayuda de las cintas.

### Precauciones:

No sujete con demasiada fuerza los cinturones, ya que podría provocar molestias, este inmovilizador es universal para uso en camillas de rescate.

### Advertencias:

Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. No exponga al fuego.

### Composición del Producto:

Tela y cintas de poliéster, hebillas plásticas, espuma de poliuretano y cintas de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:  
Ancho:  
Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

### EAN-13:

Unitalla: 7506372604349



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**