



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



ortbásicos



OB03 Collarín Cervical Perfil Bajo

Colores: Arena / Azul.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Gde.

Uso Común:

Indicado para disminuir la movilidad de la zona cervical, su aplicación más común es en el tratamiento de esguinces cervicales o el llamado síndrome de latigazo, también es usado como soporte postquirúrgico.

Instrucciones de Uso:

Coloque el collarín al rededor de su cuello cuidando que la etiqueta quede en la parte exterior y ajuste con el cierre de contacto.

Precauciones:

Ajustar sin apretar para evitar molestias y escoriaciones en la piel, utilizar la talla adecuada. El uso y tiempo de este producto como tratamiento, será determinado por el médico.

Advertencias:

El uso sin supervisión médica puede ocasionar más daños que beneficios. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. No exponga al fuego.

Composición del Producto:

Hule de poliuretano, cierre de contactel y tejido acrílico.

Medidas de Empaque:

Chico:

Alto: 50 cm.

Ancho: 13 cm.

Profundidad: 3 cm.

Mediano:

Alto: 52 cm.

Ancho: 13 cm.

Profundidad: 3 cm.

Grande:

Alto: 56 cm.

Ancho: 13 cm.

Profundidad: 3 cm.

Extra Grande:

Alto: 61 cm.

Ancho: 13 cm.

Profundidad: 3 cm.

Peso de Producto empacado:

Chico: 50 g.

Mediano: 60 g.

Grande: 60 g.

Extra Gde: 70 g.

Clave SAT: 42241803

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Azul:

Chico: 7506372602970

Med.: 7506372602963

Gde.: 7506372602956

Extra: 7506372602987

Arena:

Chico: 7506372603212

Med.: 7506372603205

Gde.: 7506372603199

Extra: 7506372603229



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO