



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



ortbásicos



OB05 Inmovilizador de Hombro

Color: Azul.
Tallas: Infantil / Adulto.

Uso Común:

Diseñado para mantener el brazo contra el cuerpo, recomendado en lesiones donde es necesario limitar los movimientos, en lesiones de articulación y ligamento glenohumeral, cabeza humeral, acromion, clavícula e indicado en lesiones de manguito rotador.

Instrucciones de Uso:

1. Colocar el brazo dentro de la bolsa del cabestrillo
2. Pasar las cintas de manera cruzada por la espalda.
3. Sujetar las cintas sobre el cuerpo del cabestrillo ajustándolas a la altura adecuada.
4. Cuidar que el brazo quede en posición horizontal y cómodo.
5. Colocar la banda sujetando la tira de contacto al cuerpo del cabestrillo y rodeando el brazo lesionado y el torso por la parte de la espalda.
6. Sujetar la banda con la tira de contacto sobre sí misma, dejando en libertad el otro brazo y sin ejercer demasiada fuerza.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste la banda con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden presentarse molestias y escoriaciones si el producto no se utiliza de manera adecuada. Este producto podría ser inflamable. No se exponga al fuego.

Composición del Producto:

Tela de nylon con relleno de hule espuma, cintas de polipropileno y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cm.
Ancho: 15 cm.
Profundidad: 6 cm.

Peso de Producto empacado:

Infantil: 100 g.
Adulto: 150 g.

Clave SAT: 42241809

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Infantil: 7506372603700
Adulto: 7506372603694



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

