



OD01 Cabestrillo Sencillo

Color: Negro.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande.

Uso Común:

Auxiliar ortopédico usado para estabilizar la posición de las extremidades superiores por lesiones y afecciones en diferentes niveles; cintura escapular, brazo, antebrazo y mano, debido a luxaciones, fracturas, cirugías, por mencionar algunos, su función es mantener el brazo en posición horizontal ligeramente elevada, para proporcionar apoyo y reposo, reduciendo el dolor al evitar movimientos bruscos.

Instrucciones de Uso:

1. Doble cuidadosamente el brazo lesionado a altura del codo y sosténgalo al frente.
2. Coloque el brazo dentro del cuerpo o bolsa del cabestrillo.
3. Pase la correa del cabestrillo por detrás del cuello y asegúrelo con el contactel.
4. Descanse el brazo dentro del cabestrillo, de manera que el codo quede del lado cerrado.
5. Cuide que su brazo quede en posición horizontal y de manera cómoda.

Precauciones:

Ejercite sus dedos según las instrucciones de su médico para evitar la rigidez de la mano.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de poliéster, hombrera de tela acojinada, eslabón metálico y cinta con cierre de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto: 20.5 cm.

Ancho: 10 cm.

Profundidad: 2.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Chico: 70 g.

Mediano: 90 g.

Grande: 90 g.

Extra Gde: 110 g.

Clave SAT: 42241801

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372602314

Mediano: 7506372602093

Grande: 7506372602086

Extra Gde: 7506372602369



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com