



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD02F Collarín tipo Filadelfia

Color: Piel.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande.

Uso Común:

Auxiliar en esguinces de tercer o segundo grado, buscando la estabilidad, elongación la inmovilización de la columna cervical con la finalidad de que disminuya la inflamación y movilidad en este segmento.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la parte posterior del collarín por encima de su nuca.
2. Coloque la parte frontal que posee el orificio sobre la parte posterior, procurando que el mentón esté ubicado de forma cómoda.
3. Ajuste con los cierres de contacto laterales del collarín.

Precauciones:

Este producto debe ser utilizado bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias por opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Polietileno reticulado, polietileno semi rígido y cierres de contactel.

Registro Sanitario:
2129C2019 SSA

Medidas de Empaque:
Alto: 20 cm.
Ancho: 20 cm.
Profundidad: 20 cm.

Peso de Producto empacado:
Chico: 110 g.
Mediano: 110 g.
Grande: 120 g.
Extra Gde: 120 g.

Clave SAT: 42241803

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372606220
Mediano: 7506372606237
Grande: 7506372606244
Extra Gde: 7506372606251



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**