



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## OD03 Cabestrillo tipo Canguro

Color: Negro.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande.

### Uso Común:

Este cabestrillo es un auxiliar ortopédico que ayuda a soportar el peso de cualquier tipo de vendaje o férula, así como para mantener el brazo en reposo durante la rehabilitación.

### Instrucciones de Uso:

1. Doble cuidadosamente el brazo lesionado a altura del codo y sosténgalo al frente.
2. Coloque el brazo dentro del cuerpo o bolsa del cabestrillo.
3. Pase las cintas del cabestrillo por detrás de la espalda en forma cruzada.
4. Sujete las cintas con el cierre de contacto sobre el cuerpo del cabestrillo ajustándolos a la altura deseada.
5. Cuide que su brazo quede en posición horizontal y de manera cómoda.

### Precauciones:

Este auxiliar debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de nylon con relleno de hule espuma, cintas de polipropileno y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto: 33 cm.

Ancho: 19 cm.

Profundidad: 3 cm.

### Peso de Producto empacado:

Chico: 70 g.

Mediano: 90 g.

Grande: 100 g.

Extra Gde: 110 g.

Clave SAT: 42241801

Clave de Unidad: H87

### EAN-13:

Chico: 7506372600273

Mediano: 7506372600365

Grande: 7506372600297

Extra Gde: 7506372600280



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**