



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD04 Soporte para Clavícula

Color: Beige.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande.

Uso Común:

El soporte para clavícula está diseñado para mantener los hombros hacia atrás y restringir el movimiento del hueso fracturado, su diseño está pensado para corregir y adoptar una buena postura corporal retrayendo los hombros y promover la recuperación. Recomendado en casos de fracturas de clavícula distal, del tercio medio y laxaciones por ruptura de ligamento.

Instrucciones de Uso:

1. Colocar el parche de manera horizontal en el centro de la espalda.
2. Sostener con las almohadillas acojinadas por la parte frontal de los hombros.
3. Pasar los tirantes por el eslabón metálico que se encuentran en los extremos del parche.
4. Estirar las cintas hasta que los hombros queden alineados.
5. Sujetar los tirantes con el contactel que se encuentra en la tira acojinada.

Precauciones:

Este auxiliar debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela laminada, cintas de poliéster, eslabones metálicos, cojinetes de poliuretano y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto: 23 cm.

Ancho: 15 cm.

Profundidad: 3 cm.

Peso de Producto empacado:

Chico: 100 g.

Mediano: 100 g.

Grande: 110 g.

Extra Gde: 110 g.

Clave SAT: 42241804

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372602697

Mediano: 7506372602673

Grande: 7506372602666

Extra Gde: 7506372602703



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**