



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD05B Inmovilizador en Banda

Color: Negro.
Tallas: Unitalla

Uso Común:

Este cabestrillo es un auxiliar ortopédico que ayuda a soportar el peso de cualquier tipo de vendaje o férula, así como a mantener el brazo en reposo y cómodo durante la rehabilitación.

Instrucciones de Uso:

1. Forme un brazaletes por la parte interior con la banda, como se muestra en la imagen.
2. Pase la banda del cabestrillo por la espalda hacia el frente y sobre el hombro contrario.
3. Pase el otro extremo de la banda por debajo de la muñeca.
4. Sujete la punta con el cierre de contacto sobre el mismo cuerpo de la banda.
5. Cuide que su brazo quede cómodo y en posición horizontal.
6. Sujete la esquina de la banda con el cierre de contacto sobre el cuerpo del cabestrillo.
7. Rodee con la banda la zona del torso por la parte posterior y pegue sobre sí misma por la parte frontal, dejando libre el brazo contrario al lesionado.

Medidas de Empaque:

Alto: 29 cm.
Ancho: 15 cm.
Profundidad: 9 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 150 g.

Clave SAT: 42241704

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372602413



Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon con relleno de hule espuma y cierres de contactel.



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

