



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD06 Muñequera Estabilizadora con Pulgar en Abducción

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande.

Modelo: Izquierda / Derecha

Uso Común:

Se utiliza como auxiliar en problemas de síndrome de Querváin, artritis reumatoide y/o lesiones de articulación de pulgar que requieran también de la inmovilización de muñeca.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque su muñequera verificando que la barra de aluminio se posicione en la parte palmar.
2. Introduzca el pulgar en el compartimiento superior de la prenda y ajuste con el contactel.
3. Cierre la muñequera con las cintas inferiores, apoyándose de los eslabones plásticos y asegure con los cierres de contacto.

Precauciones:

Este auxiliar debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon laminada, bies de poliéster, cierres de contactel, varilla plástica y varilla de aluminio moldeada.

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cm.

Ancho: 15 cm.

Profundidad: 4 cm.

Peso de Producto empacado:

Chico: 140 g.

Mediano: 140 g.

Grande: 160 g.

Extra Gde: 170 g.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Derecha:

Chico: 7506372605896

Mediano: 7506372605902

Grande: 7506372605919

Extra Gde: 7506372605926

Izquierda:

Chico: 7506372605933

Mediano: 7506372605940

Grande: 7506372605957

Extra Gde: 7506372605964



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

