



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD07 Inmovilizador de Dedo

Color: Negro.
Tallas: Unitalla

Uso Común:

Se utiliza para inmovilizar falanges en casos de traumatismos leves en los que se presenten dolores y/o molestias.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque el inmovilizador por encima de su mano por el lado opuesto a la palma.
2. Asegure el cinturón inferior cuidando de no ejercer demasiada presión en la muñeca.
3. Sujete el dedo a inmovilizar con ayuda del cinturón superior, ajustando de manera cómoda.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de presión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon laminada, cierres de contactel y varilla de aluminio.

Medidas de Empaque:

Alto: 28 cm.
Ancho: 8.5 cm.
Profundidad: 3.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 40 g.

Clave SAT: 42241707

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372605681



lavese a mano en agua templada con jabón neutro



no exprimir



no utilizar maquinas de lavar y o secar



no usar cloro



no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**