



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



OD08 Inmovilizador de Pulgar

Color: Negro.
Tallas: Unitalla

Uso Común:

Se utiliza para inmovilizar y estabilizar la articulación cúbito, radio carpal en caso de traumatismo leve que presenten dolor y/o molestias.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque el inmovilizador por el costado de la mano lesionada, cuidando que la varilla cubra el dedo a inmovilizar.
2. Ajuste el cinturón del pulgar sin ejercer demasiada fuerza.
3. Asegure la prenda con los cinturones inferiores, cuidando de no ejercer demasiada fuerza en la muñeca y que mantenga una posición cómoda.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon laminada, cierres de contactel y varilla de aluminio.

Medidas de Empaque:

Alto: 28 cm.
Ancho: 8.5 cm.
Profundidad: 3.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 50 g.

Clave SAT: 42241806

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372605698



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**