



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## OD12 Tobillera Elástica Ventilada


Color: Beige.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento y recuperación de lesiones musculares, torceduras, debilidad en el tobillo o como soporte deportivo.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque y sostenga la lengüeta acojinada por encima del tobillo por la parte interna.
2. Pase la banda de la tobillera rodeando el tobillo sobre la lengüeta para sujetar la misma.
3. Gire la banda por debajo del pie, a la altura del arco de la planta.
4. Pase el resto de la banda por encima del empeine y sujete la tira de contactel sobre la lengüeta.

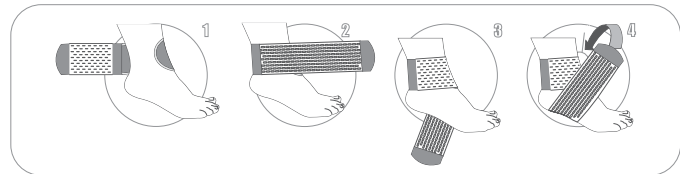

### Medidas de Empaque:

Alto: 18 cm.  
Ancho: 10 cm.  
Profundidad: 2.5 cm.

### Peso de Producto empacado:

Unitalla: 70 g.

Clave SAT: 42241701

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372600860

### Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Elástico de poliéster, tela de algodón laminada, bies de poliéster y cierres de contactel.



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**