



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODF04 Faja Sacro Lumbar Ventilada

Color: Beige.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande / Doble Extra Grande.

Uso Común:

La faja Sacro sirve como auxiliar en la reducción de dolores de ciática, dolores musculares, rehabilitación post quirúrgica o problemas generales de la parte baja de la espalda o zona lumbar.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la faja abierta sobre la zona sacro lumbar a modo que la etiqueta se ubique en la parte de la espalda.
2. Estire los elásticos anchos hacia la zona abdominal uniendo las superficies de contactel.
3. Asegure de igual forma los elásticos angostos para reforzar el soporte sin exceder la fuerza de presión.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Elástico ventilado, contactel y varillas de aluminio.

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cm.

Ancho: 16.5 cm.

Profundidad: 4.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Chica: 150 g.

Mediana: 150 g.

Grande: 150 g.

Extra Gde: 150 g.

Doble Extra Gde: 150 g.

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chica: 7506372602833

Mediana: 7506372602840

Grande: 7506372602857

Extra Gde: 7506372602864

Doble XL: 7506372607616



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**