



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODF05 Faja Industrial

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande.

Uso Común:

La faja Industrial promueve una correcta postura para evitar dolores en la zona lumbar. No evita lesiones por levantar cargas pesadas, por lo que se recomienda apegarse a la norma **NOM-036-1-STPS-2018** donde se establece la carga máxima que puede levantar un trabajador, así como la técnica adecuada para el levantamiento de objetos pesados para reducir las lesiones.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la faja iniciando por los tirantes, los cuales deberán cruzarse por la espalda y sostenerse en sus hombros.
2. Ajustar el largo de los tirantes usando la hebilla plástica y cuidando que la faja se ubique a la altura de la cintura.
3. Una vez a la altura adecuada, cierre la faja tirando de los elásticos y sujetándolos con el contactel.
4. Tire con ambas manos de los elásticos frontales y sujételos sobre la tira de contacto para finalmente ajustar el cinturón de refuerzo con el broche.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Elástico, contactel, cinta de seguridad, varillas y hebillas plásticas.

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cm.

Ancho: 16.5 cm.

Profundidad: 4.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Chica: 150 g.

Mediana: 150 g.

Grande: 150 g.

Extra Gde: 150 g.

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chica: 7506372604295

Mediana: 7506372604301

Grande: 7506372604318

Extra Gde: 7506372604325



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

