



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODF06 Faja Dorso Lumbar

Color: Beige.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande / Doble Extra Grande.

### Uso Común:

La faja Dorso Lumbar es una ayuda ortésica que sirve para soportar y contener la zona lumbar y la región sacra de la espalda. Su uso está recomendado en casos de dolor lumbar agudo, ayuda a mejorar la funcionalidad y a reducir el dolor de espalda, complementando el tratamiento médico y de rehabilitación prescrito, pero nunca sustituyéndolo.

### Instrucciones de Uso:

1. Colocar la faja al rededor del tronco, iniciando por la espalda.
2. pasar por el área abdominal entre la pelvis y el pecho.
3. Cerrar los elásticos anchos con las cintas de contacto.
4. Posteriormente cerrar los elásticos angostos de manera cruzada.
5. Realizar un cruce con las cintas por la espalda, asando por debajo de las axilas y tirar de ellas hacia el frente.
6. Finalmente cerrar con el broche plástico asegurando el soporte.

### Precauciones:

Ajuste el largo de las cintas según le sea requerido, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias por opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela laminada, elástico, varillas de aluminio, cintas de poliéster y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Chica:

Mediana:

Grande:

Extra Gde:

Doble Extra Gde:

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

### EAN-13:

Chica: 7506372606183

Mediana: 7506372606190

Grande: 7506372606206

Extra Gde: 7506372606213

Doble XL: 7506372607623



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO