



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODF07 Faja para Colostomía

Color: Beige.

Tallas: Unitalla / Doble Extra Grande.

### Uso Común:

La faja para Colostomía ayuda a contener la zona abdominal proporcionando mayor seguridad y comodidad posterior a una cirugía, auxiliar en la fijación y contención de la bolsa de colostomía.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque y fije la bolsa apoyándose del arillo dentro del orificio de la bolsa, cuidando que quede por fuera de la faja.
2. Coloque la faja al rededor del área abdominal, de forma que el orificio de la faja coincida con la posición de la bolsa.
3. Fije la bolsa a su cuerpo y cierre la faja usando los cierres de contacto para asegurar el soporte.

### Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela laminada, elástico, cintas de poliéster, varillas y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Doble XL:

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

### EAN-13:

Unitalla: 7506372606176

Doble XL: 7506372607593



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**