



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODF08 Corrector de Postura

Color: Negro.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Se utiliza para ayudar a que el cuello, hombros y espalda regresen y permanezcan en la curvatura natural de la columna vertebral. Su función consiste en forzar los músculos suave y cómodamente para que permanezcan en la posición adecuada, el uso repetido de este auxiliar estimula y activa la memoria de los músculos al rededor de la columna vertebral.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la espaldera de manera vertical al centro de la espalda.
2. Sujete con la banda frontal a la altura de su abdomen y cierre con la tira de contacto.
3. Pase las cintas largas por el frente de los hombros y por debajo de las axilas.
4. Cruce las cintas por la espalda, pasando por la trabilla que está colocada en la parte baja de la espaldera y tire de ellas hasta que los hombros lleguen a la posición correcta.
5. Fije las dos cintas a la banda frontal sin perder la posición de los hombros y sujételas con las tiras de contacto.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela laminada, bies de poliéster, varillas plásticas y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho: .

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chico:

Mediano:

Grande:

Extra Gde:

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372607739

Mediano: 7506372607746

Grande: 7506372607753

Extra Gde: 7506372607760



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

