



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODF09 Soporte para Hernia Inguinal

Color: Beige.

Tallas: Chico / Mediano / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Se utiliza comúnmente como soporte de hernias inguinales reducibles laterales ya sea izquierda, derecha o bilaterales. Puede ser usado también como apoyo post quirúrgico para evitar reincidencias o molestias.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque los cojinetes por dentro del parche frontal que tiene forma de hueso y adhiera al contactel.
2. Coloque el parche de manera frontal por debajo del ombligo, cuidando que el o los cojinetes estén ubicados sobre el área de la hernia.
3. Pase las tiras delgadas de elástico por entre las ingles y sujételas con las tiras de contactel sobre el cinturón elástico de cintura.
4. Finalmente cierre la faja y asegure con el contactel sobre el cinturón ancho de elástico para asegurar el soporte.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de nylon, elásticos de poliéster y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto: 38 cm.

Ancho: 23 cm.

Profundidad: 5 cm.

Peso de Producto empacado:

Chico: 320 g.

Mediano: 320 g.

Grande: 350 g.

Extra Gde: 370 g.

Clave SAT: 42241802

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Chico: 7506372607807

Mediano: 7506372607814

Grande: 7506372607821

Extra Gde: 7506372607838



lavese a mano en agua templada con jabón neutro



no exprimir



no utilizar maquinas de lavar y o secar



no usar cloro



no exponer al sol

HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**