



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODF10 Soporte para Hernia Umbilical

Color: Beige.  
Tallas: Unitalla.

### Uso Común:

El soporte umbilical es un complemento ortopédico utilizado para contener la zona

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque los cojinetes por dentro de la bolsa frontal de la faja, puede colocar uno o ambos, dependiendo las necesidades de opresión.
2. Ubique el o los cojinetes sobre la zona afectada.
3. Pase el resto de la faja o cinturón al rededor del cuerpo.
4. Finalmente cierre y asegure la faja con la tira de contacto, adhiriendo sobre el área acojinada del producto y refuerce con las dos tiras de contacto delgadas.

### Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de nylon, elásticos de poliéster y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:  
Ancho:  
Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT: 42241808

Clave de Unidad: H87

### EAN-13:

Unitalla: 7506372607845



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**