



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN04 Soporte para Epicondilitis de Neopreno

Color: Negro.
Tallas: Unitalla.

Uso Común:

Auxiliar en el tratamiento y disminución del dolor ocasionado por problemas de tendinitis o inflamación de los músculos extensores debido a movimientos repetitivos o sobrecargas musculares.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la banda alrededor del antebrazo, procurando que la almohadilla se ubique sobre el tendón afectado.
2. Pase la cinta de contacto por el eslabón y asegure sin ejercer demasiada fuerza adhiriendo sobre la misma cinta.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bies elástico, eslabón plástico y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:
Ancho:
Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Unitalla: 7506372604202



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**