



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN08 Rodillera Larga de Neopreno

Color: Negro.
Tallas: Unitalla / Doble Extra Grande.

Uso Común:

La rodillera larga se utiliza como auxiliar en ligeras contusiones, artrosis, artritis, tratamientos post quirúrgicos o alguna otra patología de rodilla en la que se requiera centrar y/o disminuir la carga de la rótula.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera de manera frontal cuidando que el cojinete de media luna quede centrado y por debajo de la rótula.
2. Estire las bandas y rodee por detrás de la rodilla y adhiera sobre la misma prenda para asegurar el soporte.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bies elástico y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:
Ancho:
Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Unitalla:
Doble XL:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Unitalla: 7506372604233
Doble XL: 7506372607647



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

