



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODN09 Rodillera Rotuliana de Neopreno

Color: Negro.  
Tallas: Unitalla.

**Uso Común:**  
Auxiliar en casos de tendinitis o tendinopatía rotuliana.

**Instrucciones de Uso:**  
1. Coloque la prenda por detrás de la rodilla y tire de las cintas con dirección hacia el frente de manera que la rótula se mantenga en la abertura central.  
2. Ajuste con los cierres de contacto adhiriendo sobre la misma prenda, cuidando que el cojinete se encuentre por debajo de la rótula.

**Precauciones:**  
No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

**Advertencias:**  
Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

**Composición del Producto:**  
Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bies elástico y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:  
Ancho:  
Profundidad:

**Peso de Producto empacado:**  
Unitalla:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

**EAN-13:**  
Unitalla: 7506372604264



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME  
LO BIEN  
HECHO EN  
MEXICO**