



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN15 Rodillera Mecánica Cerrada de Neopreno

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o también para el tratamiento post quirúrgico.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera introduciendo el pie por el lado más ancho de la prenda.
2. Deslice hasta que el cojinete quede ubicado en la parte inferior de la rótula.
3. Sujetar por la parte frontal pasando las cintas de contacto por el eslabón plástico y asegurando con los cierres para asegurar el soporte.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas metálicas articuladas, bies elástico, eslabones plásticos y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chica:

Mediana:

Grande:

Extra Gde:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Chica: 7506372605971

Mediana: 7506372605988

Grande: 7506372605995

Extra Gde: 7506372606008



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**