



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN16 Rodillera Mecánica Abierta de Neopreno

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o también para el tratamiento post quirúrgico.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera por la parte frontal, ubicando en cojinete por debajo de la rótula.
2. Cierre la prenda por la parte posterior con ayuda de los cierres de contactel.
3. Pase las cintas por los eslabones plásticos para asegurar el soporte y ajuste con los cierres de contactel.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas metálicas articuladas, bies elástico, eslabones plásticos y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chica:

Mediana:

Grande:

Extra Gde:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Chica: 7506372606015

Mediana: 7506372606022

Grande: 7506372606039

Extra Gde: 7506372606046



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**