



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN17 Rodillera Mecánica Postoperatoria de Neopreno

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Auxiliar en lesiones de ligamentos laterales, meniscos o también para el tratamiento post quirúrgico.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera por la parte posterior de la rodilla.
2. Cierre la prenda en la parte frontal con ayuda de los cierres de contactel, cuidando que la parte inferior se sujete por debajo de la róula.
3. Pase las cintas por los eslabones plásticos para asegurar el soporte y ajuste con los cierres de contactel.
4. Verifique que la rótula se ubique en la zona descubierta de la prenda.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas metálicas articuladas, bies elástico, eslabones plásticos y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chica:

Mediana:

Grande:

Extra Gde:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Chica: 7506372606053

Mediana: 7506372606060

Grande: 7506372606077

Extra Gde: 7506372606084



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO