



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN18 Rodillera Corta de Neopreno con Varillas Flexibles

Color: Negro.
Tallas: Unitalla / Doble Extra Grande.

Uso Común:

Se utiliza como auxiliar en contusiones ligeras, artrosis, artritis, tratamientos post quirúrgicos o alguna otra patología de rodilla en la que se requiera centrar y/o disminuir la carga en la rótula.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera de manera frontal cuidando que el cojinete de media luna quede centrado y por debajo de la rótula.
2. Estire las bandas y rodee por detrás de la rodilla y adhiera sobre la misma prenda para asegurar el soporte.
3. Asegure que las varillas de la prenda se encuentren bien ubicadas en las zonas laterales.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas flexibles, bies elástico, y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto: 23.5 cm.
Ancho: 14 cm.
Profundidad: 4 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 130 g.
Doble XL: 140 g.

Clave SAT: 46182209

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372607654
Doble XL: 7506372607661



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

