



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.

**ORTHO DAI**®



## ODN19 Rodillera Larga de Neopreno con Varillas Flexibles

Color: Negro.

Tallas: Unitalla / Doble Extra Grande.

### Uso Común:

Se utiliza como auxiliar en contusiones ligeras, artrosis, artritis, tratamientos post quirúrgicos o alguna otra patología de rodilla en la que se requiera centrar y/o disminuir la carga en la rótula.

### Instrucciones de Uso:

1. Coloque la rodillera de manera frontal cuidando que el cojinete de media luna quede centrado y por debajo de la rótula.
2. Estire las bandas y rodee por detrás de la rodilla y adhiera sobre la misma prenda para asegurar el soporte.
3. Asegure que las varillas de la prenda se encuentren bien ubicadas en las zonas laterales.

### Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas flexibles, bies elástico, y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

Unitalla:

Doble XL:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

### EAN-13:

Unitalla: 7506372607678

Doble XL: 750637260



**HECHO EN MEXICO**

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

