



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN20 Soporte de Neopreno para Clavícula

Color: Negro.
Tallas: Unitalla.

Uso Común:

El soporte para clavícula está diseñado para mantener los hombros hacia atrás y restringir el movimiento del hueso fracturado, su diseño está pensado para corregir y adoptar una buena postura corporal retrayendo los hombros y promover la recuperación. Recomendado en casos de fracturas de clavícula distal, del tercio medio y laxaciones por ruptura de ligamento.

Medidas de Empaque:

Alto: 25 cm.
Ancho: 16.5 cm.
Profundidad: 4.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 100 g.

Clave SAT: 42241804

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372607692

Instrucciones de Uso:

1. Coloque el soporte de manera horizontal en el centro de la espalda.
2. Ubique las almohadillas en la zona frontal de los hombros.
3. Pase los tirantes a través de los eslabones plásticos.
4. Tire de los tirantes para que los hombros adopten una posición correcta.
5. Sujete y asegure el soporte con los cierres de contacto.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varillas flexibles, bies elástico, eslabones plásticos, hombreras acojinadas y cierres de contactel.



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

