



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN22 Soporte de Neopreno para Hombro

Color: Negro.
Tallas: Unitalla.

Uso Común:

El soporte para hombro es auxiliar en dolores de la articulación del hombro, para el cuidado de luxaciones o subluxaciones de la articulación escapulo-humeral, casos de inestabilidad del hombro, lesiones musculares, casos de condromalacia patelar o como sistema de termo compresión. La almohadilla de presión puede ajustarse para aumentar o disminuir la presión según las necesidades del paciente, útil para ejercitarse ayudando a tensar o relajar los músculos, puede colocar hielo o compresas frías en el compartimiento de la almohadilla para ayudar a la desinflamación del hombro.

Medidas de Empaque:

Alto: 27 cm.
Ancho: 10 cm.
Profundidad: 5.5 cm.

Peso de Producto empacado:

Unitalla: 100 g.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque el soporte sobre el hombro afectado.
2. Sujete con la tira de contacto debajo del hombro para asegurar debajo de la axila.
3. Pase la tira larga por debajo del brazo opuesto.
4. Pase la cinta por el eslabón plástico y ajuste con la tira de contacto.
5. Finalmente ajuste la almohadilla con los cierres de contactel en la posición que requiera.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, bies elástico, eslabón plástico y cierres de contactel.

Clave SAT: 42241809

Clave de Unidad: H87

EAN-13:

Unitalla: 7506372607715



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

