



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.

ORTHO DAI®



ODN24 Muñequera de Neopreno con Doble Varilla

Color: Negro.

Tallas: Chica / Mediana / Grande / Extra Grande

Uso Común:

Se utiliza como auxiliar en problemas de síndrome carpiano, artritis reumatoide, esguinces y en procesos post quirúrgicos.

Instrucciones de Uso:

1. Ubique la orientación correcta de la muñequera, según la mano lesionada, y coloque las varillas del lado correcto, de forma que la varilla moldeada quede del lado de la palma.
2. Introduzca la mano lesionada cuidando que la varilla se encuentre en la zona palmar.
3. Ajuste los cinturones con ayuda de los eslabones plásticos y asegure con los cierres de contacto sin ejercer demasiada fuerza.

Precauciones:

No ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión. Este producto es solo un auxiliar, no es por sí mismo regenerador de algún tipo de fractura.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de neopreno cubierta de nylon y poliéster, varilla de aluminio, varilla de poliuretano, bies elástico y cierres de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

Chica:

Mediana:

Grande:

Extra Gde:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

Chica: 7506372606053

Mediana: 7506372606060

Grande: 7506372606077

Extra Gde: 7506372606084



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

**CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO**