



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



OP01V Cabestrillo Sencillo Ventilado

Color: Azul / Rojo.

Tallas: 4-6 años / 8-10 años / 12-14 años.

Uso Común:

Auxiliar ortopédico usado para estabilizar la posición de las extremidades superiores por lesiones y afecciones en diferentes niveles; cintura escapular, brazo, antebrazo y mano, debido a luxaciones, fracturas, cirugías, por mencionar algunos, su función es mantener el brazo en posición horizontal ligeramente elevada, para proporcionar apoyo y reposo, reduciendo el dolor al evitar movimientos bruscos.

Instrucciones de Uso:

1. Doble cuidadosamente el brazo lesionado a altura del codo y sosténgalo al frente.
2. Coloque el brazo dentro del cuerpo o bolsa del cabestrillo.
3. Pase la correa del cabestrillo por detrás del cuello y asegúrelo con el contactel.
4. Descanse el brazo dentro del cabestrillo, de manera que el codo quede del lado cerrado.
5. Cuide que su brazo quede en posición horizontal y de manera cómoda.

Precauciones:

Ejercite sus dedos según las instrucciones de su médico para evitar la rigidez de la mano.

Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela de malla de poliéster, hombrera en tela acojinada, eslabón metálico y cinta con cierre de contactel.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

4-6 años:

8-10 años:

12-14 años:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

AZUL:

4-6 años: 7506372604806

8-10 años: 7506372604844

12-14 años: 7506372604882

ROJO:

4-6 años: 7506372604776

8-10 años: 7506372604813

12-14 años: 7506372604851



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

CONSUME
LO BIEN
HECHO EN
MEXICO