



ortopedia  
de  
excelencia  
S.A.P.I. de C.V.



## OP04 Soporte para Clavícula

Color: Azul / Rojo.

Tallas: 4-6 años / 8-10 años / 12-14 años.

### Uso Común:

El soporte para clavícula está diseñado para mantener los hombros hacia atrás y restringir el movimiento del hueso fracturado, su diseño está pensado para corregir y adoptar una buena postura corporal retrayendo los hombros y promover la recuperación. Recomendado en casos de fracturas de clavícula distal, del tercio medio y laxaciones por ruptura de ligamento.

### Instrucciones de Uso:

1. Colocar el parche de manera horizontal en el centro de la espalda.
2. Sostener con las almohadillas acojinadas por la parte frontal de los hombros.
3. Pasar los tirantes por el eslabón metálico que se encuentran en los extremos del parche.
4. Estirar las cintas hasta que los hombros queden alineados.
5. Sujetar los tirantes con el contactel que se encuentra en la tira acojinada.

### Precauciones:

Este auxiliar debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

### Advertencias:

Pueden aparecer molestias y escoriaciones si no se usa adecuadamente. Algunos de los componentes de este producto podrían ser inflamables. **No exponga al fuego.**

### Composición del Producto:

Tela laminada, cintas de poliéster, eslabones metálicos, cojinetes de poliuretano y cierres de contactel.

### Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

### Peso de Producto empacado:

4-6 años:

8-10 años:

12-14 años:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

### EAN-13:

#### AZUL:

4-6 años: 7506372605049

8-10 años: 7506372605087

12-14 años: 7506372605124

#### ROJO:

4-6 años: 7506372605018

8-10 años: 7506372605056

12-14 años: 7506372605094



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406  
Colonia La Asunción  
San Francisco Totimehuacan  
Puebla, Puebla C.P. 72595  
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

