



ortopedia
de
excelencia
S.A.P.I. de C.V.



OP09 Inmovilizador de Muñeca

Color: Azul / Rojo.

Tallas: 4-6 años / 8-10 años / 12-14 años.

Uso Común:

Auxiliar en traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura, inmovilización controlada de la articulación, post operatorio de sinovitis, osteoartritis degenerativas y esguinces recidivantes de muñeca.

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la muñequera del lado palmar verificando que la barra de aluminio esté ubicada en el centro de la palma.
2. Sujete la prenda con los cierres de contactel.
3. Para cambiar el sentido de izquierda o derecha, retire la barra de aluminio por la parte inferior del contactel y coloque del lado opuesto por la misma abertura inferior.

Precauciones:

Esta órtesis debe utilizarse bajo prescripción médica, no ajuste la banda con demasiada fuerza ya que podría generar molestias de opresión.

Advertencias:

Pueden presentarse molestias y escoriaciones si el producto no se utiliza de manera adecuada. Este producto podría ser inflamable. **No exponga al fuego.**

Composición del Producto:

Tela laminada de poliéster, cierres de contactel y varilla de aluminio.

Medidas de Empaque:

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Peso de Producto empacado:

4-6 años:

8-10 años:

12-14 años:

Clave SAT:

Clave de Unidad:

EAN-13:

AZUL:

4-6 años: 7506372605407

8-10 años: 7506372605445

12-14 años: 7506372605483

ROJO:

4-6 años: 7506372605377

8-10 años: 7506372605414

12-14 años: 7506372605452



HECHO EN MEXICO

Fabricado por:



Boulevard Carlos Camacho Espíritu 1406
Colonia La Asunción
San Francisco Totimehuacan
Puebla, Puebla C.P. 72595
RFC OEX 140604 TN3

atencion.clientes@ortopediadeexcelencia.com

